

**Verifine****ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК****НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, в вариантах исполнения: 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм, 0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм, 0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек (далее иглы Verifine) предназначены для подкожного введения инсулина при лечении диабета в условиях клиник, больниц, в полевых условиях, а также для использования пациентами в домашних условиях.

**Внимание:** рекомендацию по выбору размера иглы, места укола и технике введения нужно получить у лечащего врача.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При использовании медицинского соблюдайте правила антисептики: руки и место укола необходимо обработать антисептиком.
- Не используйте иглу без упаковки или в поврежденной упаковке.
- Регулярно меняйте место инъекции.
- После вскрытия упаковки немедленно используйте иглу, затем утилизируйте ее.
- Выбрасывайте использованные иглы только с надетым на них внешним защитным колпачком.
- Не используйте иглу с истекшим сроком годности.
- Не храните шприц-ручку с установленной иглой.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ**

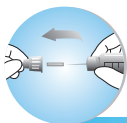
- Использовать при температуре от 0 до +50 С°.
- Хранить от 0 до +50 С° и отн. влажности воздуха не выше 80% в сухом проветриваемом помещении, в месте защищенном от прямых солнечных лучей.
- Транспортировка от -20 до +50 С°.
- После транспортировки в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Оторвите защитный ярлык иглы.

**1**

Совместите шприц-ручку с внутренней резьбовой частью основания иглы, наворачив иглу по часовой стрелке.

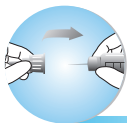
**2**

Снимите верхний колпачок иглы (сохраните его).

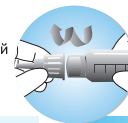
Снимите и выбросьте внутренний колпачок иглы.

**3 4**

Удалите воздух из резервуара шприц-ручки и иглы. Установите дозировку для инъекции. Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой. Введите иглу под кожу. Большим пальцем нажмите на ручку установки дозы. Оставьте иглу на месте на 5-10 секунд для предотвращения вытекания инсулина из места введения. Вытащите иглу из кожи.

**5**

Завершите инъекцию, надев на иглу внешний колпачок.

**6**

Удалите иглу со шприц-ручки, повернув ее против часовой стрелки.

**7**

**Внимание:** чтобы избежать случайных уколов, никогда не надевайте внутренний колпачок обратно на иглу.

Универсальная винтовая резьба (согласно стандарта ISO11608-2:2012) обеспечивает совместимость игл Verifine с одноразовыми и многоразовыми шприц-ручками типа А, в том числе следующих производителей: ХумаПенЛюксера ДТ, ХумаПен® Саввио, ХумаПен® ЭргоII, Хумалог® КвикПен, НовоРапид® ФлексПен®, НовоПен® 4, Левемир® ФлексПен®, Тресиба® ФлексТач®, НовоПен Эхо®, Виктоза®, КликСТАР, СолоСтар®, AutopenClassic, Autopen 24, Биосулин® Пен и других.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Иглы Verifine – 100 шт.;
- Фирменная упаковочная коробка – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

В комплект не входит:

- Шприц-ручка;
- Спиртовая салфетка.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

Иглы Verifine простерилизованы в окиси этилена. Изделия в первичной ненарушенной упаковке являются стерильными, нетоксичными и апиrogenными в течение 5 лет.

**СРОК ГОДНОСТИ**

5 лет с момента производства. Иглы Verifine должны использоваться в течение срока годности, иглы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

**СИМВОЛЫ И НАДПИСИ**

	Наименование и адрес изготовителя		Знак соответствия Ростест
<b>REF</b>	Каталожный номер		Не содержит латекс
<b>LOT</b>	Номер партии		См. инструкцию
	Срок годности		Знак «Зеленая точка»
	Не использовать повторно		Содержит достаточное для 100 инъекций количество
<b>STERILE</b>	Стерилизовано в окиси этилена		Маркировка CE

Производитель:

Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд  
провинция Чжэцзян, г. Ханчжоу, р-н Юйхан, Цанцяньстрит, Лунтань Роуд, № 12  
Тел.: +86 571 8877 2986; e-mail: admin@promisemed.ca; www.promisemed.ca

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АВАНТМЕД»  
119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4, офис 104  
тел.: +7 (495) 220-17-19; e-mail: info@avantmed.ru; www.avantmed.ru.